





**Bedienungsanleitung Escape-Sheet®
Standard & Premium**

<p>1 Legen Sie das Evakuierungstuch auf den Lattenrost. Achten Sie darauf, dass das Etikett sichtbar bleibt (die richtige Seite oben). Entsprechende Pfeile geben Ihnen das Kopf- und Fußende an. Überprüfen Sie, ob das Etikett sichtbar ist und legen Sie die Matratze auf das Escape-Sheet®.</p> <p>Achtung: maximale Matratzengröße ± 90x200cm</p> <p>Das Bett kann nun nach den Regeln Ihres Hauses hergerichtet werden.</p>	
<p>2 Befestigen Sie das Escape-Sheet® an die Matratze, indem Sie die Eckbänder anbringen. Lassen Sie den Patienten so flach wie möglich auf der Matratze liegen (ggf.zusätzliche Kissen entfernen, die Arme des zu Evakuierenden sollten unter der Decke liegen). Bringen Sie nun die Befestigungsbänder (Standard) oder body-flaps (Premium) über der Decke an. Ziehen Sie die Befestigungsbänder oder body-flaps fest. Dabei die normale Spannung einhalten und Diese nicht zu straff ziehen.</p> <p>Bringen Sie ebenfalls das Fußband (Premium) an und ziehen Sie Dieses ebenfalls an. Der Patient ist nun sicher "verpackt". Wichtig: Fahren Sie das Bett auf die niedrigste Stufe herunter.</p>	
<p>3 Ziehen Sie das Escape-Sheet® niemals schräg aus dem Bett: Der Patient könnte hierbei seitwärts aus dem Bett stürzen.</p> <p>Achtung: das Escape-Sheet® nicht als Tragetuch nutzen. Maximale Traglast 250kg.</p>	
<p>4 Fassen Sie die Zugschleife am Fußende und ziehen Sie die Einheit aus Patient und Matratze senkrecht (im 90° Winkel) aus dem Bett. Ziehen Sie den Patienten in einer Bewegung gerade aus dem Bett. Sie werden merken, dass, wenn Sie dies richtig machen, es in einer fließenden Bewegung geschieht. Diese Handlung kann im Prinzip durch eine Person ausgeführt werden.</p>	

5	<p>Ziehen Sie das Escape-Sheet® durch den Korridor an einen sicheren Ort. Sie können dies gerne mit 2 Personen tun. Durch das Anheben des Fußendes, schaffen Sie einen geringeren Gleitwiderstand. Kurven lassen sich ebenfalls einfacher nehmen, wenn Sie das Fußende etwas anheben. Sie können die 2te Zugschlaufe einsetzen, um in den Kurven mitzusteuern.</p> <p>ACHTUNG: Der Fußbodenbelag kann den Gleitwiderstand beeinflussen.</p>	
6	<p>Falls eine vertikale Evakuierung über eine Treppe notwendig ist, empfehlen wir diese Arbeit durch 2 Personen durchführen zu lassen. So können Sie das Gewicht optimal verteilen. Machen Sie dabei auch Gebrauch von der 2. Zugschlaufe. Auf der Treppe gehen Sie rückwärts weiter und ziehen Sie den Patienten in einer Bewegung über die Treppe. So verhindern Sie den lang andauernden Kontakt mit dem ersten Rand der Treppe. Wenn Sie die Matratze in Höhe Ihrer Hüfte ruhen lassen, können Sie die Abstiegschwindigkeit besser beherrschen. Der 2te Helfer kann zum Beispiel das obere Zugband zur Unterstützung nutzen, um die Gleitgeschwindigkeit zu beeinflussen.</p>	
7	<p>Kontrollieren Sie das Escape-Sheet® nach Gebrauch immer auf eventuelle Beschädigungen.</p>	
8	<p>Sofern notwendig, waschen gemäß Waschanleitung.</p>	
9	<p>Die Escape-Sheets trocken und bei Zimmertemperatur aufbewahren.</p>	

ACHTUNG:

Das Escape-Sheet® darf nur von eingewiesenen Personen bedient werden.

Beschädigte Tücher müssen entsorgt werden.

Änderungen an dem product dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Bitte diese Anleitung aufbewahren.