

Handleiding Escape-Mattress®
Mortipod

1	Haal de Escape-Mattress® Mortipod uit de opbergtas en plaats deze op de grond.	
2	Vouw de Escape-Mattress® Mortipod uit elkaar door de veiligheidsriem los te maken die hem bij elkaar houdt. Open de andere veiligheidsriemen als de matras geheel is uitgevouwen. Rits daarna de body bag open.	
3	Plaats het lichaam in de body bag en zorg ervoor dat het hoofd op de hoofdsteun geplaatst wordt.	
4	Rits de body bag weer dicht en maak de 3 veiligheidsriemen weer vast.	
5	Maak de, in lengte verstelbare, sleepbanden los bij het hoofd- en voeteneinde van de Escape-Mattress® Mortipod. LET OP: de sleepbanden zijn voorzien van extra grepen en een verbindingsstuk, voor een betere ergonomische handling.	

6	De overledene kan nu d.m.v. de sleepbanden verplaatst worden. Escape Mobility Company adviseert om een horizontale en verticale verplaatsing met de Escape-Mattress® Mortipod altijd met 2 personen uit te voeren (slepend) of met 4 personen (dragend).	
7	Zodra het lichaam van de overledene uit de Mortipod gehaald is kan de body bag in zijn totaliteit los geritst worden van de onderkant. Hiervoor gebruik je de ritsen aan beide langszijden van de matras. Hierdoor kan de binnenkant van de body bag eenvoudig gereinigd worden. LET OP: de body bag is ook beschikbaar als los artikel (art. nr. 21052).	
8	Controleer de Escape-Mattress® Mortipod alvorens opbergen op eventuele beschadigingen.	
8 bis 1	Indien noodzakelijk, reinig met water en desinfecterende zeep.	
9	Plaats de Escape-Mattress® Mortipod terug op de aangewezen plaats	

Let op: De Escape-Mattress® Mortipod mag alleen bediend worden door getrainde personen.
Training mag uitsluitend worden uitgevoerd door personen die gecertificeerd zijn door Escape Mobility Company.
Bewaar deze handleiding.