



## Evakuierung bettlägeriger Personen

### Was ist ein Escape-Sheet®?

Personen, die ihr Bett nicht selbstständig verlassen können, müssen während eines Notfalls mit einem Evakuierungshilfsmittel evakuiert werden. Ein solches Hilfsmittel ist das Escape-Sheet®. Eine Matratze, unter der sich ein Escape-Sheet® befindet, kann sehr schnell in eine Evakuierungsmatratze verwandelt werden.

### Wie funktioniert ein Escape-Sheet®?


In einem Notfall werden die Sicherheitsgurte unter der Matratze hervorgeholt. Diese Gurte werden über dem Patienten und dem Bettzeug zusammengezogen und geschlossen, wodurch dieser auf der Matratze fixiert wird. Das Escape-Sheet® wird dann zusammen mit dem Patienten auf den Boden und über die Flure (falls notwendig über die Treppe treppab) an einen sicheren Ort gezogen.



### Vorteile des Escape-Sheet® HFR:



- HFR Ausführung: Hitze- und flammbeständig (EN ISO 11612).
- Static-Control™ (antistatisches Polyester).
- Hydro-tec Nanotechnologie (wasserabweisend).
- Zugbänder und Griffe in gut sichtbarer grüner Farbe.
- Extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- Längere Lebensdauer der Kunststoff-Schnallen durch Aufbewahrung in Taschen.
- Die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Eckbänder geeignet für jede Matratzenhöhe.
- Premium Model: Inklusive body-flaps und extra langen Zugbändern sowie einem zusätzlichen Spannungsgurt zur Minimierung der Matratzenbreite am Fußende.
- TÜV & CE zertifiziert.


### UNSERE EMPFEHLUNG

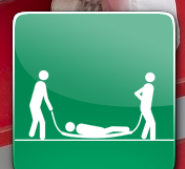Sorgen Sie dafür, dass jedes Bett in Ihrem Unternehmen mit einem Escape-Sheet® ausgestattet ist, damit Sie immer auf eine optimale und schnelle Evakuierung vorbereitet sind.

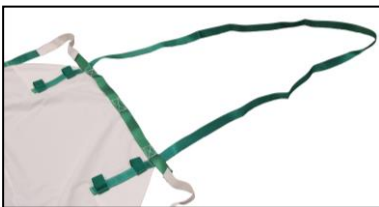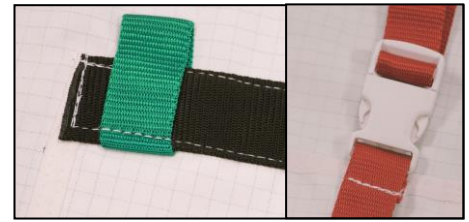



Spezifikationen:	Escape-Sheet® HFR Standard 	Escape-Sheet® HFR Premium 
Artikelnummer:	21241 (D)	21251 (D)
Abmessungen (Länge x Breite):	ca. 200 x 90 cm	ca. 200 x 90 cm
Material:	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™
maximale Traglast:	200 kg	200 kg
Gewicht:	ca. 1100 Gramm	ca. 1500 Gramm
Vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	✓
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	✓
direktes Evakuieren aus dem Bett:	✓	✓
Hitze- und flammbeständig (EN ISO 116112):	✓	✓
Industriewäsche 75° C:	✓	✓
Hydro-tec Nanotechnologie (wasserabweisend):	✓	✓
Eckbänder für jede Matratzenhöhe:	✓	✓
Ausgestattet mit body-flaps & extra Spanngurt am Fußende:	-	✓
Schnallen in Taschen:	✓	-
Bänder in 3 verschiedenen Farben (für selbsterklärende Bedienung):	optional	optional
Garantie:	2 Jahre	2 Jahre

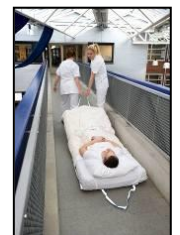

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.  
 Geprüft auf Schadstoffe nach Öko-Tex Standard 100.

