









**Gebrauchsanweisung Escape-Mattress®
Bariatric**

Escape Mobility International BV
Marconistraat 32, NL-6372PN,
Landgraaf (NL)

1	Nehmen Sie die Escape-Mattress® Bariatric aus der Aufbewahrungstasche.	
2	Falten Sie die Escape-Mattress® Bariatric auseinander. Achten Sie darauf, dass die Seite mit den Sicherheitsgurten oben liegt.	
3	Befestigen Sie die verstellbare Kopfstütze mittels der beiden Klettbänder an der Kopfseite der Matratze.	
4	Öffnen Sie die Verschlüsse und klappen Sie die Bodyflaps auf.	
4	Legen Sie die zu evakuierende Person auf die Escape-Mattress® Bariatric. Sorgen Sie dafür, dass der Kopf auf der Kopfstütze aufliegt und Sie den Kopf mit den Sicherungsbändern sichern können.	
6	Legen Sie die Füße der zu evakuierenden Person in den Fußsack.	
7	Schlagen Sie nun die Bodyflaps über die zu evakuierende Person und schließen Sie die Sicherheitsgurte. Sorgen Sie dafür, dass sich die Arme unter den Bodyflaps befinden.	

8	Schieben Sie die Enden der Sicherheitsgurte unter die geschlossenen Gurte, damit diese durch frei hängen nicht stören.	
9	Beginnen Sie nun mit der Evakuierung. Hierzu sind mindestens 4-6 Personen nötig. Verwenden Sie das verstärkte Zugband, das an der Matratze eingehängt werden kann. Ziehen Sie die zu evakuierende Person mit den Füßen voran Richtung Treppe. Wenn Sie das Fußende etwas anheben, wird der Reibungswiderstand und damit der Kraftaufwand deutlich geringer.	 
10	Um Kurven zu bewältigen, kann es hilfreich sein: <ul style="list-style-type: none"> • das Querband am Zugband zu nutzen • zusätzlich die verstärkten Griffe zu nutzen. 	 
11	An der Treppe übernehmen 2 Personen die Evakuierung am Fußende der Matratze .Durch leichtes anheben des Fußendes, können auch Wendelungen besser überwunden werden (ebenso beim drehen auf dem Treppenpodest). Die Evakuierungshelfer die am Fussende stehen, sollten um die Abstiegsgeschwindigkeit besser kontrollieren zu können, ebenfalls die Matratze an Ihrer Hüfte bzw. am Oberschenkel abstützen. Hierdurch werden auch die Personen, die am Kopfende stehen entlastet.	
12	2 bis 4 Evakuierungshelfer sollten am Kopfende der zu evakuierenden Person stehen. Nutzen Sie hierbei die extra verstärkten Schleifbaender, die Sie hierzu einhaken können. Sie können so das Gewicht besser unter Kontrolle halten.	
13	Bewegen Sie sich nun zügig aber ruhig treppab. Die Evakuierungshelfer am Kopfende haben die Aufgabe der Evakuierungsgeschwindigkeit der ziehenden Personen gleichmäßig zu folgen. Hierdurch ist sichergestellt, dass Sie in aufrechter Position bleiben und Sie keine zusätzliche Belastung Ihres eigenen Körpers haben.	

14	Bringen Sie die zu evakuierende Person an einen sicheren Ort bzw. zum Sammelplatz.	
15	Öffnen Sie die Sicherheitsgurte und helfen Sie der zu evakuierenden Person von der Escape-Mattress® Bariatric.	
16	Kontrollieren Sie die Escape-Mattress® Bariatric nach jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen.	
17	Falls notwendig, reinigen Sie die Matratze mit Wasser oder Desinfektionsmittel.	
18	Legen Sie im Anschluss die Escape-Mattress® Bariatric wieder an einen geschützten und trockenen Platz.	

Achtung: Die Escape-Mattress® Bariatric darf nur durch geschulte Personen bedient werden.
Die Maximale Traglast der Escape-Mattress® Bariatric beträgt 300kg.
Eine beschädigte Escape-Mattress® darf nicht genutzt werden.
Veränderungen an diesem Produkt dürfen ausschliesslich durch den Hersteller erfolgen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.