




**Gebrauchsanweisung Escape-Mattress®  
Junior**

Escape Mobility International BV  
Marconistraat 32, NL 6372PN,  
Landgraaf (NL)

1	<p>Nehmen Sie die Escape-Mattress® Junior aus der Hülle und legen Sie die Matratze auf den Boden.</p>	
2	<p>Befestigen Sie die verstellbare Kopfstütze mittels der beiden Klettbänder an der Kopfseite der Matratze.</p> <p><b>Achtung:</b> Die Escape-Mattress® Junior niemals ohne Kopfstütze nutzen.</p>	
3	<p>Öffnen Sie den Sicherheitsgurt sowie die Klettverschlüsse.</p> <p><b>Achtung:</b> Die Escape-Mattress® Junior ist nur für max. 2 Kinder pro Evakuierung geeignet. Die Evakuierung kann durch einen Helfer erfolgen.</p>	
4	<p>Legen Sie das zu evakuierende Kind auf die Escape-Mattress® Junior. Sorgen Sie dafür, dass der Kopf hierbei auf der Kopfstütze aufliegt, indem Sie den Kopf mit den Sicherungsband an der Kopfstütze sichern .</p>	
5	<p>Die Sicherheitsgurte an der Innenseite der Bodyflaps müssen über der Brust verschlossen werden, die Arme sollen hierbei aber über dem Gurt bleiben. Dies verhindert ein verrutschen des zu evakuierenden Kindes während der Evakuierung über die Treppe .</p>	 

6	Ziehen Sie nun die Bodyflaps so feste wie möglich zu.	
7	Beginnen Sie nun mit der Evakuierung der beiden Kinder. Verwenden Sie hierzu stets das Zugband am Fußende der Matratze. Bringen Sie die zu evakuierenden Kinder Richtung Treppe und starten Sie die Evakuierung über die Treppe immer mit den Füßen voran. Wenn Sie das Fußende dabei etwas anheben, wird der Reibungswiderstand und damit der Kraftaufwand deutlich geringer.	
10	Um Kurven zu bewältigen, kann es hilfreich sein, das Querband am Zugband zu nutzen.	
14	Bringen Sie die zu evakuierenden Kinder an einen sicheren Ort bzw. zum Sammelplatz.	
15	Öffnen Sie die Bodyflaps und helfen Sie den zu evakuierenden Kindern aus der Escape-Mattress® Junior.	
16	Kontrollieren Sie die Escape-Mattress® Junior nach jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen.	
17	Falls notwendig, reinigen Sie die Matratze mit Wasser oder Desinfektionsmittel.	
18	Legen Sie im Anschluss die Escape-Mattress® Junior wieder an Ihren Platz.	

**Achtung:** Die Escape-Mattress® Junior darf nur durch geschulte Personen bedient werden.  
Die Escape-Mattress® Junior ist geeignet für Kinder bis 3 Jahre.  
Die Escape-Mattress® Junior kann durch eine Person bedient werden.  
Die Maximale Traglast der Escape-Mattress® Junior beträgt 150kg.  
Eine beschädigte Escape-Mattress® darf nicht genutzt werden.  
Veränderungen an diesem Produkt dürfen ausschliesslich durch den Hersteller erfolgen.  
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.