




**Gebrauchsanweisung Escape-Mattress®
Vacuum**

Escape Mobility International BV
Marconistraat 32, NL 6372PN,
Landgraaf (NL)

1	<p>Legen Sie die Escape-Mattress® Vacuum auf den Boden.</p>	
2	<p>Befestigen Sie die verstellbare Kopfstütze mittels der beiden Klettbänder an der Kopfseite der Matratze. Öffnen Sie die Verschlüsse und klappen Sie die Bodyflaps auf.</p> <p>Achtung: Nutzen Sie die Escape-Mattress® Vacuum niemals ohne Kopfstütze. Bei dieser Matratzenausführung können Sie ebenfalls <u>Kopfstabilisierungsblöcke mit Klett</u> verwenden.</p>	
3	<p>Legen Sie die zu evakuierende Person auf die Escape-Mattress® Vacuum. Sorgen Sie dafür, dass der Kopf auf der Kopfstütze aufliegt und Sie den Kopf mit den Sicherungsbändern sichern können.</p>	
4	<p>Legen Sie die Füße der zu evakuierenden Person in den Fußsack. Dieser kann bei Bedarf auch vergrößert werden.</p>	
5	<p>Schlagen Sie nun die Bodyflaps über die zu evakuierende Person und schließen Sie die Sicherheitsgurte.</p> <p>Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sich die Arme unter den Bodyflaps befinden. Zwischen den Bodyflaps ist genug Platz um z.B. eine Infusion anzuhängen.</p>	

6	Lösen Sie das Klettband am Kopfende um die Schleifbänder herauszunehmen.	
7	Beginnen Sie nun mit der Evakuierung. Hierzu sind mindestens 2 Personen nötig. Verwenden Sie hierzu das Zug/Schleifband am Fußende. Ziehen Sie die zu evakuierende Person mit den Füßen voran Richtung Treppe. Wenn Sie das Fußende etwas anheben, wird der Reibungswiderstand und damit der Kraftaufwand deutlich geringer.	
8	Um Kurven zu bewältigen, kann es hilfreich sein: <ul style="list-style-type: none"> • das Querband am Zugband zu nutzen • zusätzlich die verstärkten Griffe zu nutzen. 	
9	An der Treppe übernimmt 1 Personen die Evakuierung am Fußende der Matratze .Durch leichtes anheben des Fußendes, können auch Wendelungen besser überwunden werden (ebenso beim drehen auf dem Treppenpodest). Die Person die am Fußende steht, sollte um die Abstiegs geschwindigkeit besser kontrollieren zu können, ebenfalls die Matratze an der Hüfte bzw. an seinem Oberschenkel abstützen. Hierdurch wird auch die Personen, die am Kopfende steht entlastet.	
10	Die Person an der Kopfseite der Matratze muss bedenken, dass die Geschwindigkeit am Ende der Treppe etwas höher sein muss, um den Übergang von der Treppe zur Ebene etwas zu erleichtern.	
11	Bringen Sie die zu evakuierende Person an einen sicheren Ort bzw. zum Sammelplatz oder der bereitstehenden Krankentrage. (Falls Sie das Vakuumsystem nicht nutzen möchten, fahren Sie sofort mit Punkt 13 fort.)	

12a	<p>Wenn Sie das Vacuumsystem nutzen möchten, öffnen Sie den Klettverschluß am Fußende und entnehmen Sie das Kupplungsstück.</p>	
12b	<p>Schließen Sie das Kupplungsstück an die beiden Vacuumventile an. Nun können Sie mittels manueller Pumpe oder LSU (Saugereinheit) die Vacuummatratze Einsatzbereit machen .</p> <p>Nach Nutzung legen Sie das Kupplungsstück wieder an seinen Platz zurück.</p>	
12c	<p>Um den Patienten so wenig wie möglich zu bewegen, kann die Matratze in Ihrer Gesamtheit wie eine "Schere" geteilt werden.</p>	
12d	<p>Entfernen Sie vorsichtig die Kopfstütze. Betätigen Sie den Reißverschluss mit der roten Fahne am Fußende um die Matratze zu teilen.</p> <p>Achtung: 1 Helfer muss den Kopf des Patienten stützen, während ein weiterer Helfer die Matratze teilt.</p>	
13	<p>Öffnen Sie die Sicherheitsgurte und helfen Sie der zu evakuierenden Person von der Escape-Mattress® Vacuum.</p>	
14	<p>Kontrollieren Sie die Escape-Mattress® Vacuum nach jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen.</p>	
15	<p>Falls notwendig, reinigen Sie die Matratze mit Wasser oder Desinfektionsmittel.</p>	
16	<p>Legen Sie im Anschluss die Escape-Mattress® Vacuum wieder an einen geschützten und trockenen Platz.</p>	

Achtung: Die Escape-Mattress® Vacuum darf nur durch geschulte Personen bedient werden.

Die Maximale Traglast der Escape-Mattress® Vacuum beträgt 150kg.

Eine beschädigte Escape-Mattress® darf nicht genutzt werden.

Veränderungen an diesem Produkt dürfen ausschliesslich durch den Hersteller erfolgen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.