

Evakuierung bettlägeriger Personen

Was ist ein Escape-Sheet[®]?

Personen, die ihr Bett nicht selbstständig verlassen können, müssen während eines Notfalls mit einem Evakuierungshilfsmittel evakuiert werden. Ein solches Hilfsmittel ist das Escape-Sheet[®]. Eine Matratze, unter der sich ein Escape-Sheet[®] befindet, kann sehr schnell in eine Evakuierungsmatratze verwandelt werden.

Wie funktioniert ein Escape-Sheet[®]?

In einem Notfall werden die Sicherheitsgurte unter der Matratze hervorgeholt. Diese Gurte werden über dem Patienten und dem Bettzeug zusammengezogen und geschlossen, wodurch dieser auf der Matratze fixiert wird. Das Escape-Sheet[®] wird dann zusammen mit dem Patienten auf den Boden und über die Flure (falls notwendig über die Treppe treppab) an einen sicheren Ort gezogen.

Vorteile des Escape-Sheet[®]:

- Längere Lebensdauer der Kunststoff-Schnallen durch Aufbewahrung in Taschen.
- Die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Eckbänder geeignet für jede Matratzenhöhe.
- TÜV getestet bis zu 200 Kg Traglast.
- CE zertifiziert.

UNSERE EMPFEHLUNG

Sorgen Sie dafür, dass jedes Bett in Ihrem Unternehmen mit einem Escape-Sheet[®] ausgestattet ist, damit Sie immer auf eine optimale und schnelle Evakuierung vorbereitet sind.





Modell Economy Line



Waschlabel




Eckbänder für jede Matratzenhöhe



Schnallen in Taschen

Spezifikationen:	Escape-Sheet® Economy Line	CE
Artikelnummer:	21270	
Abmessungen (Länge x Breite):	ca. 200 x 90 cm	
Material:	67% Polyester / 33% Baumwolle	
maximale Traglast (TÜV getestet):	200 kg	
Gewicht:	ca. 800 Gramm	
Vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	
direktes Evakuieren aus dem Bett:	✓	
Industriewäsche 60° C:	✓	
Eckbänder für jede Matratzenhöhe:	✓	
Schnallen in Taschen:	✓	
Garantie:	2 Jahre	

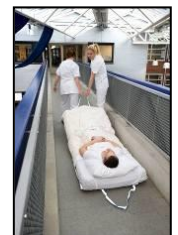

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

