



## Evakuierung bettlägeriger Personen

### Was ist ein Escape-Sheet<sup>®</sup>?

Personen, die ihr Bett nicht selbstständig verlassen können, müssen während eines Notfalls mit einem Evakuierungshilfsmittel evakuiert werden. Ein solches Hilfsmittel ist das Escape-Sheet<sup>®</sup>. Eine Matratze, unter der sich ein Escape-Sheet<sup>®</sup> befindet, kann sehr schnell in eine Evakuierungsmatratze verwandelt werden.

### Wie funktioniert ein Escape-Sheet<sup>®</sup>?


In einem Notfall werden die Sicherheitsgurte unter der Matratze hervorgeholt. Diese Gurte werden über dem Patienten und dem Bettzeug zusammengezogen und geschlossen, wodurch dieser auf der Matratze fixiert wird. Das Escape-Sheet<sup>®</sup> wird dann zusammen mit dem Patienten auf den Boden und über die Flure (falls notwendig über die Treppe treppab) an einen sicheren Ort gezogen.

### Vorteile des Escape-Sheet<sup>®</sup> HFR:

- HFR Ausführung: Hitze- und flammbeständig (EN ISO 11612).
- Static-Control<sup>™</sup> (antistatisches Polyester).
- Hydro-tec Nanotechnologie (wasserabweisend).
- Zugbänder und Griffe in gut sichtbarer grüner Farbe.
- Extra lange Zugbänder zur rückschonenden Evakuierung.
- Längere Lebensdauer der Kunststoff-Schnallen durch Aufbewahrung in Taschen.
- Die Griffe erleichtern das seitwärts manövrieren.
- Eckbänder geeignet für jede Matratzenhöhe.
- TÜV & CE zertifiziert.


### UNSERE EMPFEHLUNG

Sorgen Sie dafür, dass jedes Bett in Ihrem Unternehmen mit einem Escape-Sheet<sup>®</sup> ausgestattet ist, damit Sie immer auf eine optimale und schnelle Evakuierung vorbereitet sind.

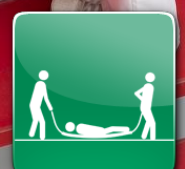



Modell HFR Standard

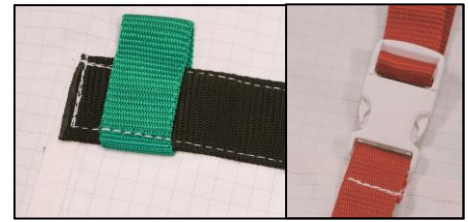

Optional: Bänder in 3 Farben



Extra lange Zugbänder



Schnallen in Taschen




Eckbänder für jede Matratzenhöhe



Waschanleitung

Spezifikationen:	Escape-Sheet® HFR Standard	CE
Artikelnummer:	21241 (D)	
Abmessungen (Länge x Breite):	ca. 200 x 90 cm	
Material:	54/45/1% PPAN-fr/lyocell/Static-Control™	
maximale Traglast:	200 kg	
Gewicht:	ca. 1100 Gramm	
Vorab kostenlose Vorführung & sachkundige Empfehlung:	✓	
innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit:	✓	
direktes Evakuieren aus dem Bett:	✓	
Hitze- und flammbeständig (EN ISO 116112):	✓	
Industriewäsche 75° C:	✓	
Hydro-tec Nanotechnologie (wasserabweisend):	✓	
Eckbänder für jede Matratzenhöhe:	✓	
Schnallen in Taschen:	✓	
Bänder in 3 verschiedenen Farben (für selbsterklärende Bedienung):	optional	
Garantie:	2 Jahre	

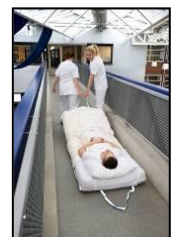

Zwischenzeitliche Änderungen der technischen Spezifikationen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
 Hergestellt durch die Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.  
 Geprüft auf Schadstoffe nach Öko-Tex Standard 100.

