








**Gebrauchsanleitung Escape-Mattress®
Economy Line / Escape-Pad**

1	Nehmen Sie die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad aus der Aufbewahrungstasche und legen Sie Diese auf den Boden.	
2	Falten Sie die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad auseinander, indem Sie die Sicherheitsgurte öffnen, die Diese zusammenhalten. Öffnen Sie ebenfalls die übrigen Sicherheitsgurte, wenn die Escape-Mattress® auseinandergefaltet auf dem Boden liegt.	
2 . 1	Legen Sie die verstellbare Kopfstütze auf die beiden Klettverschlussstreifen auf der Kopfseite der Matratze (Economy Line).	
3	Legen Sie den zu Evakuierenden auf die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad. Sorgen Sie dafür, dass der Kopf auf der Kopfstütze aufliegt. Achtung: Um es dem zu Evakuierenden angenehmer zu machen, kann ein Kissen unter das breite Band platziert werden (Escape-Pad).	
4	Legen Sie die Füße des zu Evakuierenden in den Fußsack (Economy Line – kleines Bild links). Fixieren Sie die Beine mit Hilfe des untersten Sicherheitsgurtes, indem Sie die Schnallen am Fußende öffnen (Escape-Pad - Foto rechts). Schließen Sie die Schnallen und fixieren Sie so die Unterschenkel.	

5	<p>Schließen Sie nun die Sicherheitsgurte über Brustkorb und Oberschenkeln des zu Evakuierenden.</p> <p>Achtung: Sorgen Sie dafür, dass die Arme nicht über die Matratze hinausragen.</p>	
6	<p>Der zu Evakuierende kann nun mittels der Zugbänder evakuiert werden. Die Escape Mobility Company empfiehlt die Evakuierung mittels Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad immer mit 2 Evakuierungshelfern durchzuführen.</p> <p>Achtung: Die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad ist ausschließlich als Schleifmatratze zu nutzen. Maximale schleiflast ist 150KG.</p>	
7	<p>Lösen Sie die Sicherheitsgurte und helfen Sie der evakuierten Person die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad, sofern möglich, zu verlassen.</p>	
8	<p>Kontrollieren Sie die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad nach Gebrauch immer auf eventuelle Beschädigungen.</p>	
8 bis 1	<p>Wenn notwendig, reinigen Sie die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad mit Wasser und Desinfektionsmittel.</p>	
9	<p>Stellen Sie die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad nun zurück an Ihren Platz.</p>	

Achtung: die Escape-Mattress® Economy Line / Escape-Pad darf nur von eingewiesenen Personen bedient werden.

Beschädigte Matratze müssen entsorgt werden.
 Änderungen an dem product dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden.
 Bitte diese Anleitung aufbewahren.