


Gebrauchsanleitung
Escape-Mattress® Mortipod

1	Nehmen Sie die Escape-Mattress® Mortipod aus der Aufbewahrungstasche und legen Sie Diese auf den Boden.	
2	<p>Falten Sie die Escape-Mattress® Mortipod auseinander, indem Sie die Sicherheitsgurte öffnen, die Diese zusammenhalten.</p> <p>Öffnen Sie ebenfalls die übrigen Sicherheitsgurte, wenn die Escape-Mattress® Mortipod auseinandergefaltet auf dem Boden liegt.</p> <p>Öffnen Sie danach den Reißverschluss des Leichensacks.</p>	
3	Legen Sie den zu Transportierenden in den Leichensack und stellen Sie sicher, dass der Kopf sicher in der Kopfstütze platziert ist.	
4	Schließen Sie den Leichensack und sichern Sie Diesen zusätzlich mit den 3 vorhandenen Sicherheitsgurten.	
5	<p>Lösen Sie die in der Länge verstellbaren Zugbänder am Kopf- und Fußende der Escape-Mattress® Mortipod.</p> <p>Achtung: Die Zugbänder sind mit speziellen Griffen sowie einem Verbindungsstück ausgestattet, um eine ergonomische Handhabung zu garantieren.</p>	

6	Der Verstorbene kann nun mit Hilfe der Zugbänder bewegt werden. Die Escape Mobility Company empfiehlt bei der horizontalen und vertikalen Bewegung einer Person mit der Escape-Mattress® Mortipod, dies immer mit 2 Mitarbeitern durchzuführen. Das Tragen ist mit ca. 4 Personen empfehlenswert.	
7	Sobald der verstorbene aus der Matratze entnommen wurde, kann der Leichensack von der Matratze getrennt werden. Hierzu öffnen Sie den Reißverschluss an den Längsseiten der Matratze. Das Innenleben des Leichensacks kann nun gereinigt werden. Achtung: Der Leichensack ist ebenfalls separat erhältlich. Artikelnummer: 21052.	
8	Kontrollieren Sie die Escape-Mattress® Mortipod nach Gebrauch immer auf eventuelle Beschädigungen.	
8 bis 1	Wenn notwendig, reinigen Sie die Escape-Mattress® Mortipod mit Wasser und Desinfektionsmittel.	
9	Stellen Sie die Escape-Mattress® Mortipod nun zurück an Ihren Platz.	

Achtung: Die Escape-Mattress® Mortipod darf nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
Bitte diese Anleitung aufbewahren.
Änderungen an dem product dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden.
Bitte diese Anleitung aufbewahren.