























Handleiding Escape-Chair®
VOLT

IN GEBRUIK NEMEN:		
1	Plaats de Escape-Chair® VOLT zodanig voor u neer dat u aan de kant van de rupsbanden staat.	
2	Zorg ervoor dat de wielen zijn geblokkeerd door de remmen erop te zetten. Dit doet u met uw voet. Hierdoor voorkomt u dat de Escape-Chair® VOLT van u weg rolt.	
3	Maak de veiligheidsriem los, die de Escape-Chair® VOLT bij elkaar houdt, door de rode knop in te drukken.	
4	Klap de Escape-Chair® VOLT uit door de zitting in zijn geheel naar voren te klappen.	
5	Laat de te evacueren persoon plaatsnemen in de Escape-Chair® VOLT.	
6	Maak de veiligheidsriemen vast om het bovenlichaam van de te evacueren persoon.	
7	Klap de armlenningen uit voor extra comfort.	

8	<p>Om de bedieningsbeugel in hoogte te verstellen trekt u de rode stang iets omhoog. De bedieningsbeugel kan in 3 verschillende hoogtes versteld worden. De hoogste positie heeft de voorkeur.</p>	
9	<p>Fixeer het hoofd aan de hoofdsteun m.b.v. de klittenband, als de te evacueren persoon geen controle meer heeft over het hoofd.</p>	
10	<p>Klap de voetensteun aan de voorkant uit en laat de te evacueren persoon zijn voeten hierop plaatsen.</p>	
11	<p>Klap de rupsbanden uit door aan de zijkant rechts m.b.v. het rode lipje de cassettes te ontgrendelen. Zorg ervoor dat ze helemaal uitgeklappt zijn.</p>	
12	<p>Zorg dat de aan/uit knop op de accu op "aan" staat.</p>	
13	<p>Duw op de rode knop van de display op de bedieningsbeugel om bediening en display te activeren.</p>	

TRAP AF RIJDEN:		
14	Haal de remmen met uw voet van de wielen af en rijd in de richting van de trap.	
15	Bij de trap aangekomen kantelt u de Escape-Chair® VOLT naar achter totdat deze enkel op de twee grote achterste wielen rijdt.	
16	Rijd nu iets naar voren totdat de rupsbanden op de eerste traptrede komen.	
17	Duw nu met de duim van de linkerhand op de linker zilveren knop en houd deze ingedrukt. Hierdoor komen de rupsbanden in beweging om de trap naar beneden te rijden. <u>Let op:</u> er zijn 3 daalsnelheden. Maak een keuze die voor u prettig is door op de display de snelheden aan te passen met de + en - knop. Om te stoppen op de trap laat u de zilveren knop gewoon los. Houdt wel te allen tijde de bedieningsbeugel vast.	
18	Blijf ondertussen wel de bedieningsbeugel naar beneden drukken en zorg dat u in een rechte lijn naar beneden gaat. <u>Let op:</u> doe dit altijd aan de binnenkant van de trap.	
19	Terug op het horizontale plaatst u de Escape-Chair® VOLT op de 4 wielen en vervolgt u uw weg richting de verzamelplaats.	

TRAP OP RIJDEN:		
20	Haal de remmen met uw voet van de wielen af en rijd in de richting van de trap.	
21	Bij de trap aangekomen rijdt u de Escape-Chair® VOLT achteruit totdat deze met de rupsbanden tegen de 1e traprede komt.	
22	Kantel de Escape-Chair® VOLT helemaal naar achteren totdat de rupsbanden op 2 traptreden staan.	
23	Duw nu met de duim van de rechterhand op de rechter zilveren knop en houd deze ingedrukt. Hierdoor komen de rupsbanden in beweging om de trap omhoog te rijden. <u>Let op:</u> er zijn 3 snelheden. Maak een keuze die voor u prettig is door op de display de snelheden aan te passen met de + en - knop. Om te stoppen op de trap laat u de zilveren knop gewoon los. Houdt wel te allen tijde de bedieningsbeugel vast.	
24	Blijf ondertussen wel de bedieningsbeugel naar beneden drukken en zorg dat u in een rechte lijn naar boven gaat. <u>Let op:</u> doe dit altijd aan de binnenkant van de trap.	
25	Terug op het horizontale plaatst u de Escape-Chair® VOLT op de 4 wielen en vervolgt u uw weg richting de verzamelplaats.	

INKLAPPEN / OPBERGEN		
26	<p>Bij de verzameplaats aangekomen helpt u de te evacueren persoon mee uitstappen.</p> <p>Let op: klap de voetensteun vtv in.</p>	
27	<p>Breng de Escape-Chair® VOLT terug naar de daartoe bestemde opbergplaats en klap hem weer in.</p>	
28	<p>Dit doet u door de rode stang tussen de glijriemen in te duwen totdat deze terug aansluit aan het frame en achter het veiligheidshaakje zit.</p>	
29	<p>Klap/schuif armleuningen, voetensteun en draagbeugels voor- en achterzijde in en vouw de Escape-Chair® VOLT samen door met uw voet of hand de rode stang onder de zitting iets van u af te schuiven.</p>	
30	<p>Gebruik de veiligheidsriem om de Escape-Chair® VOLT bij elkaar te houden als u hem in elkaar heeft gevouwen.</p>	
31	<p>Berg de Escape-Chair® VOLT op in de daartoe bestemde ruimte en dek indien gewenst deze af met de bijgeleverde afdekhoes. Deze ruimte dient vochtvrij te zijn.</p>	

INFORMATIE M.B.T. BATTERIJ	
	<p>De 36V batterij kan opgeladen worden aan een 220/230 volt stopcontact met de bijgeleverde kabel. U kunt tijdens het laden de batterij op de Escape-Chair® VOLT laten zitten of u kunt de batterij eraf halen.</p> <p><u>Let op:</u> de batterij moet "aan" gezet worden anders laadt deze niet op.</p>
	<p>De batterij kan gedemonteerd worden van de Escape-Chair® VOLT d.m.v het bijgeleverd setje sleutels.</p> <p><u>Let op:</u> op deze sleutels staat een code. Deze dient u ergens te noteren mochten deze sleutels ooit kwijt raken. U kunt dan met deze code nieuwe bestellen.</p>
	<p>Laadtijd batterij is 3-5 uur. De batterij kan ca. 1,5 uur continu gebruikt worden (afhankelijk van steilheid trap en gewicht inzittende).</p>
	<p>Levensduur batterij is ca. 3-5 jaar. Indien de Escape-Chair® VOLT lange tijd niet ingezet wordt adviseren wij elke 3 maanden de batterij toch opnieuw op te laden.</p>
	<p>Op het display zit een blauwe knop. Hiermee kunt u indien gewenst de LED verlichting aanzetten.</p>
	<p>Op het display aan de bedieningsbeugel is een indicator aanwezig die aangeeft hoe vol / leeg de batterij nog is.</p>

Let op: De Escape-Chair® VOLT mag alleen bediend worden door getrainde personen.

Training mag uitsluitend worden uitgevoerd door personen die gecertificeerd zijn door Escape Mobility Company.

Capaciteit Escape-Chair® VOLT is 180KG.

Bij het evacueren van personen zwaarder dan 100KG adviseren wij om de evacuatie met 2 hulpverleners uit te voeren.

De Escape-Chair® VOLT is tevens uitgerust met draaghendels aan voor- en achterzijde. Hiermee kan de Escape-Chair® VOLT ook manueel gedragen worden.

Aan de voorkant zijn deze uittrekbaar en aan de achterzijde uitklapbaar.

Escape-Chair® VOLT niet gebruiken op wenteltrappen.

De Escape-Chair® VOLT kan mogelijk zwarte strepen achterlaten op de trap.

Controleer na gebruik de Escape-Chair® VOLT op eventuele beschadigingen. Indien beschadigd neem dan contact op met Escape Mobility Company.

Schakel de Escape-Chair® VOLT na gebruik geheel uit. Dit doet u door op de batterij de knop op "uit" te zetten.

Bewaar deze handleiding.