









Gebruikshandleiding Escape-Mattress®
Bariatric

1	Haal de Escape-Mattress® Bariatric uit de opbergtas en plaats deze op de grond.	
2	Vouw de Escape-Mattress® Bariatric uit elkaar en zorg dat de kant met de veiligheidsriemen naar boven ligt.	
3	Plaats de verstelbare hoofdsteun op de 2 daartoe bestemde klittenbandstroken aan de hoofdzijde van de matras. Let op: de Escape-Mattress® niet gebruiken zonder hoofdsteun.	
4	Klik de gespen van de riemen los en open de bodyflaps aan beide kanten.	
4	Plaats de evacu�e(e) op de Escape-Mattress® Bariatric. Doe dit met voldoende hulpverleners. Zorg dat het hoofd op de hoofdsteun geplaatst wordt en fixeer het hoofd met de fixatiebanden.	
6	Plaats de voeten van de evacu�e(e) in de voetenzak.	
7	Sla de body flaps over de evacu�e(e) en sluit de veiligheidsriemen. Zorg er altijd voor dat de armen van de evacu�e(e) zich onder de body flaps bevinden.	
8	Steek de uiteinden van de veiligheidsriemen onder de gesloten riemen zodat deze niet loshangen.	

9	<p>Evacueer de persoon. Hier zijn minimaal 4-6 personen voor nodig. Maak gebruik van de extra sleekeorden die aan het matras te haken zijn. Trek de evacu�e(e) in de richting van de trap, voeten eerst, gebruikmakend van de lange sleepbanden. Wanneer u het voeteneinde hoger tilt, wordt de wrijvingsweerstand en daarmee de krachtsinspanning, duidelijk geringer.</p>	 
10	<p>Om door bochten te manoeuvreren, kan het gemakkelijker zijn om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de dwarsbanden van de sleepbanden te gebruiken • de handgrepen te gebruiken aan de zijkant van het matras. 	 
11	<p>Laat nu 2 personen aan het voeteneinde staan en laat hun nu de trap op stappen. Door het optillen van het voeteneinde kan men de eventuele draai naar de trap eenvoudiger maken (ook de draai op een bordes). Laat de personen die aan het voeteneinde staan, de matras tegen hun heup/bovenbeen steunen, zodat men een goede controle heeft over de snelheid van de afdaling. Tevens ontlast men de personen aan het hoofdeinde.</p>	
12	<p>De andere 2 tot 4 personen nemen plaats aan het hoofdeinde. Hier kan men nu 2 extra sleepkoorden bevestigen. Hiermee kan men het gewicht van de evacu�e(e) beter onder controle houden.</p>	
13	<p>Evacueer rustig de trap af. De personen aan het hoofdeinde moeten gelijk meelopen in de beweging. Op deze manier is het tevens mogelijk om rechtop te blijven lopen en hierdoor een goede lichaamshouding aan te nemen.</p>	
14	<p>Sleep de evacu�e(e) naar een veilige locatie/de verzamelplaats.</p>	
15	<p>Maak de veiligheidsriemen en body flaps los en help de evacu�e(e) uit de Escape-Mattress® Bariatric.</p>	
16	<p>Controleer de Escape-Mattress® Bariatric alvorens opbergen op eventuele beschadigingen.</p>	

17	Indien noodzakelijk, reinig met water en desinfecterende zeep.	
18	Plaats de Escape-Mattress® Bariatric terug op de aangewezen plaats.	

Let op:

De Escape-Mattress® Bariatric mag alleen bediend worden door getrainde personen.

Maximale draaglast Escape-Mattress® Bariatric is 300kg.

Een beschadigde Escape-Mattress® niet gebruiken.

Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door de fabrikant uitgevoerd worden.

Bewaar deze handleiding.