




**Gebruikshandleiding Escape-Mattress®
Junior**

1	<p>Haal de Escape-Mattress® Junior uit de opbergtas en plaats deze op de grond.</p>	
2	<p>Plaats de verstelbare hoofdsteunen op de 2 daartoe bestemde klittenbandstroken aan de hoofdzijde van de matras.</p> <p>Let op: de Escape-Mattress® Junior niet gebruiken zonder hoofdsteun.</p>	
3	<p>Klik de gesp van de veiligheidsriem los en open beide ritssluitingen.</p> <p>Let op: de Escape-Mattress® Junior is geschikt voor 2 peuters/kleuters per keer te evacueren. Dit kan door slechts 1 hulpverlener gebeuren.</p>	
4	<p>Plaats de evacu�e(s) op de Escape-Mattress® Junior Zorg dat het hoofd op de hoofdsteun geplaatst wordt en fixeer het hoofd met de fixatiebanden.</p>	
5	<p>De veiligheidsriem aan de binnenkant van de bodyflap dient gemonteerd te worden over de borst maar onder de armen van de evacu�e(s). Dit voorkomt naar beneden zakken in de matras tijdens verticale evacuatie.</p>	
6	<p>Rits nu beide de body flaps zo ver als mogelijk dicht.</p>	

7	Evacueer nu de beide evacu�e(s). Maak hierbij gebruik van de het sleepkoord aan het voeteneinde. Trek de evacu�e(s) in de richting van de trap, voeten eerst, gebruikmakend van de lange sleepband. Wanneer u het voeteneinde hoger tilt, wordt de wrijvingsweerstand en daarmee de krachtsinspanning, duidelijk geringer.	
10	Om door bochten te manoeuvreren, kan het gemakkelijker zijn om de dwarsbanden van de sleepbanden te gebruiken.	
14	Sleep de evacu�e(s) naar een veilige locatie/de verzamelplaats.	
15	Maak de veiligheidsriemen en body flaps los en help de evacu�e(s) uit de Escape-Mattress� Junior.	
16	Controleer de Escape-Mattress� Junior alvorens opbergen op eventuele beschadigingen.	
17	Indien noodzakelijk, reinig met water en desinfecterende zeep.	
18	Plaats de Escape-Mattress� Junior terug op de aangewezen plaats.	

Let op:

De Escape-Mattress  Junior mag alleen bediend worden door een getraind persoon.
De Escape-Mattress  Junior is geschikt voor kinderen t/m 3 jaar.
De Escape-Mattress  Junior kan door slechts 1 persoon bediend worden.
Maximale draaglast Escape-Mattress  Junior is 150kg.

Een beschadigde Escape-Mattress  niet gebruiken.
Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door de fabrikant uitgevoerd worden.
Bewaar deze handleiding.